

**Diluent 20 RET**


<p><b><u>Destination d'utilisation</u></b> Le dispositif est un réactif associé aux automates d'hématologie OX560RET et OX560RET Plus dédié à la réalisation d'analyses quantitatives d'échantillons de sang humain et destiné à l'aide au diagnostic et la surveillance de pathologies sanguines. Le réactif est utilisé pour rompre la membrane des globules rouges et se lier à l'hémoglobine libérée afin de déterminer sa concentration. Il est également utilisé pour identifier cinq (5) sous population de leucocytes en modifiant leurs formes. Le réactif est utilisé par les professionnels de santé au sein des institutions médicales et des laboratoires cliniques.</p>	<p><b><u>Intended use</u></b> The device is a reagent associated with hematology analyzers OX560RET and OX560RET Plus for quantitative measurements that serve in aid to diagnosis and monitoring of human blood samples. More specifically, the reagent is used to disrupt red blood cells membrane and bind to released hemoglobin to determine its concentration. It also serves to identify 5-sub populations of leucocytes by shrinking it to different shapes. The reagent is used by health professionals in health institutions and laboratories.</p>
<p><b><u>Spécifications du produit</u></b> Produit non stérile <b>Apparence</b> : Liquide clair sans précipités ou floccules <b>Volume</b> : 1 x 20L <b>Ingrédients actifs</b> : Chlorure de sodium, muriate, sulfate de sodium anhydre, solution de conservation</p>	<p><b><u>Product specification</u></b> Non-sterile product <b>Appearance</b> : Clear liquid free from precipitation and floccules <b>Volume</b> : 1 x 20L <b>Active ingredients</b> : Sodium chloride, muriate, anhydrous sodium sulfate, preservation solution</p>
<p><b><u>Stockage et expiration:</u></b> Garder le produit à l'abri de la lumière. <b>Environnement opérationnel</b> : le produit est stable pendant 60 jours entre 15°C et 30°C <b>En stock</b> : le produit est stable pendant 2 ans entre 2°C et 40°C</p>	<p><b><u>Storage and expiration:</u></b> Keep the product away from sunlight <b>Operational environment</b> : the product is stable for 60 days between 15°C and 30°C <b>In storage room</b> : the product is stable for 2 years between 2°C and 40°C</p>
<p><b><u>Système associé :</u></b> Analyseur d'hématologie OX – 560 RET et OX – 560 RET Plus <b>Réactifs</b> : OR50C2000, OR50L1000, OR50P0010, OR50S2000, OR50ST0020</p>	<p><b><u>Associated system :</u></b> Auto Hematology Analyzer OX – 560 RET and OX – 560 RET Plus <b>Reagents</b> : OR50C2000, OR50L1000, OR50P0010, OR50S2000, OR50ST0020</p>
<p><b><u>Procédure d'utilisation :</u></b> 1. Injectez le tube d'entrée de diluent dans le récipient de diluent, évacuez l'air du récipient et serrez le couvercle. Cliquez sur Modifier dans l'interface de maintenance. Effectuez le comptage à blanc dans l'interface de comptage et assurez-vous que la valeur à blanc répond aux normes. 2. Placez le diluent sous l'analyseur. Consulter le manuel opérateur de l'automate si nécessaire.</p>	<p><b><u>How to use:</u></b> 1. Inject the diluent inlet tube into the diluent container, exhaust the air from the container and tighten the lid. Click Edit in the maintenance interface. Perform blank counting in the counting interface and ensure that the blank value meets the standards. 2. Place the diluent beneath to the analyzer. Consult the operator's manual of the automaton if necessary.</p>

**Précautions :**

- Ne pas inhaler ou ingérer. Si inhalé ou ingéré, consulter immédiatement un médecin.
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Dans le cas d'un contact sur la peau, rincer abondamment la zone avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux avec de l'eau et consulter un médecin. En cas d'incident, avertir le service client Balio Diagnostics.
- Si le produit est congelé (partiellement ou entièrement), décongeler complètement, garder le contenant à température ambiante et le remuer doucement. Faites un comptage à blanc avant d'analyser un échantillon.
- Jeter les réactifs, déchets et consommables conformément à votre réglementation locale
- Le résultat du test peut ne pas être fiable si : le réactif a expiré ou est contaminé ; le réactif a été en contact avec de la poussière de l'air, l'échantillon n'est pas traité proprement ; le réactif est mélangé ou utilisé en association avec des réactifs tiers.

**Precautions:**

- Do not inhale or ingest. If inhaled or ingested, seek medical attention immediately.
- Avoid all contact with skin and eyes. In case of contact with skin, rinse the area with plenty of water. In case of contact with eyes, rinse eyes with plenty of water and seek medical attention. In case of any incident, notify Balio Diagnostics customer service.
- If the product is frozen (partially or entirely), thaw completely. Keep the container in room temperature and shake it gently. Do a blank counting test before analyzing any sample.
- Dispose of reagents, waste and consumables in accordance with your local regulations
- The test result may be unreliable if: the reagent has expired or is contaminated; the reagent has been in contact with air dust ; the sample is not handled properly ; the reagent is mixed or used in combination with third-party reagents.

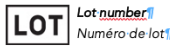

Lot number  
Numéro de lot



In Vitro Diagnostics



Unique Device Identifier



Product reference  
Référence produit



Temperature limitations  
Limites de température



Consult instructions for use  
Consulter les instructions d'utilisation



Keep away from sunlight  
Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil



Manufacturing date  
Date de fabrication



Expiration date  
Date d'expiration



Manufactured by / Fabriqué par Balio Diagnostics  
6 rue Bazter - 64210 Bidart - France  
+33 5 59 03 19 88 - contact@baliodiagnostics.com  
www.baliodiagnostics.com

