

Probe Cleaner RET


<p><u>Destination d'utilisation</u> Le dispositif est un réactif associé aux automates d'hématologie OX560RET et OX560RET Plus dédiés à la réalisation d'analyses quantitatives d'échantillons de sang humain et destiné à l'aide au diagnostic et la surveillance de pathologies sanguines. Le réactif est utilisé pour effectuer un nettoyage intensifié des différents compartiments de l'analyseur pour assurer adéquatement un comptage et une identification des cellules sanguines. Le réactif est utilisé par les professionnels de santé au sein des institutions médicales et des laboratoires cliniques.</p>	<p><u>Intended use</u> The device is a reagent associated with hematology analyzers OX560RET and OX560RET Plus for quantitative measurements that serve in aid to diagnosis and monitoring of human blood samples. More specifically, the reagent is used to perform an enhanced cleaning of the analyzer's compartments to ensure proper blood cell counting and identification. The reagent is used by health professionals in health institutions and laboratories.</p>
<p><u>Spécifications du produit</u> Produit non stérile Apparence : Liquide clair sans précipités ou floccules Volume : 1 x 100 mL Ingrédients actifs : hypochlorite de sodium, ea</p>	<p><u>Product specification</u> Non-sterile product Appearance : Clear liquid free from precipitation and floccules Volume : 1 x 100 mL Active ingredients : sodium hypochlorite, water</p>
<p><u>Stockage et expiration:</u> Garder le produit à l'abri de la lumière. Environnement opérationnel : le produit est stable pendant 60 jours entre 15°C et 30°C En stock : le produit est stable pendant 1 an entre 2°C et 40°C</p>	<p><u>Storage and expiration:</u> Keep the product away from sunlight Operational environment : the product is stable for 60 days between 15°C and 30°C In storage room : the product is stable for 1 year between 2°C and 40°C</p>
<p><u>Système associé :</u> Analyseur d'hématologie OX – 560 RET et OX – 560 RET Plus Réactifs : OR50C2000, OR50C5000, OR50D2000, OR50L1000, OR50S2000, OR50ST0020</p>	<p><u>Associated system :</u> Auto Hematology Analyzer OX – 560 RET and OX – 560 RET Plus Reagents : OR50C2000, OR50C5000, OR50D2000, OR50L1000, OR50S2000, OR50ST0020</p>
<p><u>Procédure d'utilisation :</u> Cliquez sur « nettoyer » dans l'interface de fonctionnement, placez le nettoyant pour sonde de 2 ml sous la sonde, puis cliquez sur OK pour commencer le nettoyage. Consulter le manuel opérateur si nécessaire.</p>	<p><u>How to use:</u> Click "clean" in operation interface, put the 2 mL probe cleaner under the probe and then click "OK" to start the clean. Consult the operator's manual of the automaton if necessary.</p>

Précautions :

- Ne pas inhaler ou ingérer. Si inhalé ou ingéré, consulter immédiatement un médecin.
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Dans le cas d'un contact sur la peau, rincer abondamment la zone avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux avec de l'eau et consulter un médecin. En cas d'incident, avertir le service client Balio Diagnostics.
- Si le produit est congelé (partiellement ou entièrement), décongeler complètement, garder le contenant à température ambiante et le remuer doucement. Faites un comptage à blanc avant d'analyser un échantillon.
- Jeter les réactifs, déchets et consommables conformément à votre réglementation locale
- Le résultat du test peut ne pas être fiable si : le réactif a expiré ou est contaminé ; le réactif a été en contact avec de la poussière de l'air, l'échantillon n'est pas traité proprement ; le réactif est mélangé ou utilisé en association avec des réactifs tiers.

Precautions:

- Do not inhale or ingest. If inhaled or ingested, seek medical attention immediately.
- Avoid all contact with skin and eyes. In case of contact with skin, rinse the area with plenty of water. In case of contact with eyes, rinse eyes with plenty of water and seek medical attention. In case of any incident, notify Balio Diagnostics customer service.
- If the product is frozen (partially or entirely), thaw completely. Keep the container in room temperature and shake it gently. Do a blank counting test before analyzing any sample.
- Dispose of reagents, waste and consumables in accordance with your local regulations
- The test result may be unreliable if: the reagent has expired or is contaminated; the reagent has been in contact with air dust ; the sample is not handled properly ; the reagent is mixed or used in combination with third-party reagents.

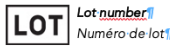

Lot number
Numéro de lot



In Vitro Diagnostics



Unique Device Identifier



Product reference
Référence produit



Temperature limitations
Limites de température



Consult instructions for use
Consulter les instructions d'utilisation



Keep away from sunlight
Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil



Manufacturing date
Date de fabrication



Expiration date
Date d'expiration



Manufactured by / Fabriqué par Balio Diagnostics
6 rue Bazter - 64210 Bidart - France
+33 5 59 03 19 88 - contact@baliodiagnostics.com
www.baliodiagnostics.com

